

Özellik Tablosu

	BELTONE FIRST 17	BELTONE FIRST 9
İşitme		
Dijital Sinyal İşlemleyici Entegre Devre (DSP-IC)	Coyote 4.5.3	Coyote 4.5.3
Geniş Dinamik Aralık Kompresyonu (Giriş Kompresyonu)	Rapid 17	Rapid 9
WDRC Zaman Sabitleri	Heceli, Normal, AVC	Heceli, Normal, AVC
Çıkış Kompresyonu	1) Genel Güç 2) 17 kanalda	1) Genel Güç 2) 9 kanalda
Gürültüde Konuşma		
CrossLink Direksiyonalite	Var	Yok
Uzaysal Direksiyonalite	Var	Yok
Adaptif Direksiyonalite	Adaptif, 15 noktada Akıllı Bant	Adaptif, 15 noktada Akıllı Bant
Sabit Direksiyonalite	Hyperkardioid	Hyperkardioid
Direksiyonel Mikrofon seçenekleri		
Band-Split Direksiyonalite*	Ayarlanabilir Karışım Noktası Frekansı	Ayarlanabilir Karışım Noktası Frekansı
Direksiyonel / Omni Mikrofon Değişimi	Konuşma Tarayıcı Pro	Konuşma Tarayıcı Pro
Direksiyonel Bant Genişliği Modeli	Akıllı Bant Yönlendirme	Akıllı Bant Yönlendirme
İşitme Konforu		
Çevresel Programlar	4	4
Gürültü Azaltımı	Ses Temizleyici Pro (5 seçenek)	Ses Temizleyici Pro (5 seçenek)
Feedback Bastırma	Feedback Silici ve Isık Kesici (5 seçenek)	Feedback Silici (5 seçenek)
Genişletme	Susturucu, 17 kanal analizi	Susturucu, 9 kanal analizi
Rüzgar Sesi Azaltma	4 seçenek	3 seçenek
Çevresel Kazanç Yönlendirme	Akıllı Kazanç Pro (7 ortam)	Akıllı Kazanç (7 ortam)
Frekans Alçaltma	Ses Değiştirici	Ses Değiştirici
Adaptasyon	Senkronize Kazanç	Senkronize Kazanç
Ek Özellikler		
Bağlanabilirlik	iPhone ile Doğrudan Bağlantı	iPhone ile Doğrudan Bağlantı
Kulaklararası Senkronizasyon	Var	Var
Asimetrik Telefon**	Var	Var
Sesli Uyanlar	Var	Var
Otomatik Telefon	Var	Var
Tinnitus Breaker Pro	Var	Var
Kablosuz Aksesuarlar		
Beltone Doğrudan Kişisel Ses Bağlantısı (myPAL)	Var	Var
Beltone Doğrudan TV Bağlantısı 2	Var	Var
Beltone Doğrudan Telefon Bağlantısı 2	Var	Var
Beltone Doğrudan Uzaktan Kumanda 2	Var	Var

MEDers

Medikal Sağ. Hiz. A.Ş.

Meşrutiyet Cad. Hatay Sok.
No:24/3 06640 Kızılay-ANKARA
Tel : +90 (312) 415 99 00
Fax : +90 (312) 419 68 77
www.maxtone.com.tr
www.meders.com.tr

Beltone First; iOS 7.X ya da daha yeni sürüm kullanılan iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPad Air, iPad (4. nesil), Retina ekranlı iPad mini, iPad mini ve iPod touch (5. nesil) ile uyumludur. Apple, Apple logosu, iPhone, iPad ve iPod touch; Apple Inc.'nin markasıdır ve ABD ve diğer ülkelerde tescillidir. App Store, Apple Inc.'nin hizmet markasıdır. Android Google Inc.'nin ticari markasıdır. Dolby ve çift D sembolü Dolby Laboratories'in tescilli markasıdır.

Beltone. Herkes iyi işitme hakkına sahiptir.

Beltone'un yolculuğu 1940'ta; kurucusu, en iyi arkadaşının yeniden duyabilmesi için bir cihaz arattığında başlamıştır. Ve 1940 yılından bugüne Beltone, işitme sorunu olan kişilere hizmet veren profesyonellere bilgi, araç, servis ve eğitimi sağlamakta; kaliteli işitmeye yönelik hizmetlerini her gün daha çok kişiye ulaştırmaktadır. Bunun için bireysel ihtiyaçlarınızı asla göz ardı etmeden teknik olarak sizin için en uygun işitme çözümlerini üretiyoruz. İlkemiz, hiç kimsenin daha iyi işitme olanağından mahrum bırakılmaması gerektiğidir.

Beltone™

Beltone **First**[™]

İşitme teknolojisinde öncü

Made for
iPod iPhone iPad

 **Beltone**



İşitme cihazlarında çıtayı yükseltiyoruz

Ay'a ilk kez adım atmak, Einstein'ın teorileri, Everest'e tırmanış... Bizi en iyi işitme teknolojisini geliştirmeye iten de işte bu öncü ruhtur. Beltone First de, çığır açan bir şey yaratma isteğimizin; yani işitme cihazlarındaki ses kalitesi, kullanım konforu ve bağlantı özelliklerine yeni standartlar getirme isteğimizin bir sonucudur.

Küçüklüğüyle neredeyse görünmeyen ve hissedilmeyen bir işitme cihazı tasarladık. Sahip olduğu daha dayanıklı muhafaza ve HPF80 NanoBlock sayesinde günlük hayatın yıpratıcı tüm etkilerine karşı sağlam kalıyor. Ve o kadar çeşitli kablosuz bağlantı imkanı sunuyor ki işitme cihazı kullanıcıları işitme cihazlarını iPhone®, iPad® ya da iPod touch®'larından kontrol edebiliyor.

Beltone First, işitme kayıplarının %90'ından fazlası için uygundur ve kişisel ihtiyaca göre ayarlanabilir. İşitme cihazı kullanıcılarının hayattan zevk almasını ve söylenen her şeyi, her durumda duymalarını sağlayan da bu ayrıcalıktır.



**Kodu tarayın ve
Beltone First
videosunu izleyin**





İşitme cihazı kullanıcıları iPhone'dan gelen telefon konuşması, müzik ve video seslerini doğrudan Beltone First işitme cihazlarında duyabilirler.

iPhone'a doğrudan bağlanan ilk işitme cihazı

Beltone First'ün sektöründe öncü 2.4 GHz kablosuz bağlantı özelliği sayesinde, işitme cihazı kullanıcıları iPhone'dan gelen sesleri artık herhangi bir adaptöre gerek kalmadan doğrudan işitme cihazlarında duyabilecekler. Güçlü kablosuz bağlantı ve en yeni, gelişmiş kablosuz radyo teknolojisini kullanarak, telefon konuşmalarını ya da istedikleri diğer sesleri yüksek çözünürlüklü stereo olarak doğrudan işitme cihazlarına aktarabilecekler. Bu fonksiyon Apple® cihazlarında en yeni iOS sürümüne özel olarak geliştirildiği için, faydalanmak için herhangi bir uygulama indirmek zorunda kalmayacaklar. Her şey kullanımlarına hazır olacak. Tam kapsamlı bir aksesuar serisi olan Beltone 2.4 GHz Kişisel Kablosuz Ağ™ ile birlikte, hem işitme cihazı kullanıcılarınızı iletişimde daha özgür kılacak, hem de sizin satışlarınıza katkı sağlayacak.

iPhone Yoluyla Doğrudan Kişiselleştirme

İşitme cihazı kullanıcıları iPhone ile doğrudan bağlantının daha çok işlevinden yararlanmak için Beltone HearPlus uygulamasını indirebilirler. Bu uygulamayı uzaktan kumanda gibi kullanarak işitme cihazı programlarını ve ses şiddetini değiştirebilirler ve kayıp işitme cihazlarının yerini tespit edebilirler.

Beltone Doğrudan Telefon Bağlantısı 2 ve SmartRemote

Doğrudan Telefon Bağlantısı 2, kablosuz iletişimi son derece net bir ses kalitesiyle sağlar ve bir nevi uzaktan kumanda gibi çalışır. Tek tuşa basarak telefonda konuşmak, program değiştirmek ya da ses şiddetini ayarlamak çok kolaydır. Ayrıca işitme cihazı kullanıcıları Telefon Bağlantısı 2 ile birlikte SmartRemote uygulamasını kullanarak, Android™ telefonlarını tam kapsamlı bir uzaktan kumandaya dönüştürebilirler. Telefonda iletişim bundan daha kolay olamazdı.

Beltone Doğrudan Tv Bağlantısı 2

Doğrudan Tv Bağlantısı 2, televizyondan aldığı yüksek kaliteli stereo sesi, neckloop ya da başka yardımcı bir alete gerek kalmadan doğrudan işitme cihazlarına aktarır. Doğrudan Tv Bağlantısı 2 ayrıca müzik setleri ve bilgisayarlarla da çalışır. Yalnızca Beltone'da bulabileceğiniz Dolby® Digital Dönüştürme özelliği sayesinde ise neredeyse tüm televizyonlarla uyumludur.

Beltone Doğrudan Kişisel Ses Bağlantısı (myPAL)

Kişisel Ses Bağlantısı (myPAL), konuşma seslerini, müziği ya da herhangi bir sesi doğrudan işitme cihazlarına aktaran bir yardımcıdır. İster sosyal bir etkinlikte, ister bir konferansta ya da konuşmada olsunlar; Beltone myPAL'i duymak istedikleri kişinin yakasına tutturmaları ya da yakınına koymaları yeterlidir.



Beltone Doğrudan myPAL



Beltone Doğrudan Telefon Bağlantısı 2



Beltone Doğrudan TV Bağlantısı 2



Beltone Doğrudan Uzaktan Kumanda



Beltone First o kadar küçüktür ki
kulağın arkasında neredeyse kaybolur

İlk tercih

Çok küçük, çok akıllı, çok sağlam

Piyasadaki en küçük RIE işitme cihazlarından olan minik, zarif Beltone First, kulağın arkasına öyle hafif oturur ki işitme cihazı kullanıcıyı varlığını bile unuttur. Küçük ama sağlam gövdesi ise hayatı dolu dolu duymalarını sağlayan en yeni teknolojiler ile donatılmıştır.

Beltone First, tasarımında da yenilikçi özelliklere sahiptir: Muhafazası günlük hayatın tüm yıpratıcı etkilerine karşı sağlam kalır ve kullanımı kolay, güçlü bir hoparlör kilidine sahiptir.

Tasarımında kullanılan silikon bazlı yeni mikrofonlar sayesinde, ısı ve nem değişiklikleri gibi çevresel etkenlere karşı daha dayanıklıdır. Tasarımda yapılan bu iyileştirme, işitme cihazının ömrü boyunca daha iyi direksiyonaliteye sahip olmasını sağlar.

Üst düzey koruma için HPF⁸⁰ NanoBlock

İşitme cihazının hoparlör de dahil her bir parçası koruyucu bir tabakayla kaplıdır. Bu tabaka nem ve terden koruyarak cihazın ömrünü uzatır, böylelikle işitme cihazı kullanıcısının aradığı üst düzey güvenilirliği de sağlar. Kısacası Beltone First, parkta yapılan kısa bir yürüyüşü de, maratonu da kaldırabilir.



HPF⁸⁰ NanoBlock sayesinde işitme cihazının üzerinde nem, ter ve kir tutunamaz.

Mükemmel ses kalitesinde öncü

Beltone 1940 yılından bu yana insanların daha iyi işitmesini sağlayacak teknolojiler geliştirmektedir. Beltone First de hemen hemen tüm işitme cihazı kullanıcılarının işitme ihtiyaçlarını karşılayabilecek son yeniliktir. Mükemmel ses kalitesine sahip, çevresini analiz eden, akıllı ve küçük işitme cihazlarıyla bilinen Beltone geleneğinin en yeni temsilcisidir.

Yeniliklerle dolu

Daha iyi işitme, daha iyi insan ilişkileri demektir. Biz de bunu bilerek, bu minik işitme cihazını işitme cihazı kullanıcılarına berrak, canlı ve detaylı ses vermesi için en yeni teknolojilerle donattık.

Bu akıllı özellikler ilk kez işitme cihazı kullanacakların alışmasını kolaylaştıracağı gibi, size de mevcut işitme cihazı kullanıcılarını cihazlarını yenilemeye ikna için birçok neden sağlayacak.

CrossLink Direksiyonalite: Sesleri beyne doğal işitmede olduğu gibi iletir. Beltone First, işitme cihazı kullanıcısının çevresini sürekli tarayarak direksiyonalite ayarlarını otomatik olarak ortama adapte eder. Bu

şekilde işitme cihazı kullanıcısı, işitmesini zenginleştiren çevresel sesleri kaybetmeden konuşma seslerine odaklanabilir. Bu özellik hangi seslerin önemli olduğuna cihazların değil, kullanıcının karar vermesini sağlar.

Siren ya da yardım çağrısı gibi güvenlik açısından önemli gördüğümüz seslerden haberdar olmak istediğimiz durumlarda bu önemlidir.

Akıllı Kazanç Pro: İşitme cihazı işitilen ortamda bir değişiklik tespit ettiğinde otomatik olarak kazancı artırır veya yükseltir ve/veya gürültü azaltımı ayarını değiştirir. Böylelikle işitme cihazı kullanıcınız sürekli ayarları değiştirmek zorunda kalmaz.



Ses Temizleyici Pro: Akıllı Kazanç Pro ile birlikte çalışarak istenmeyen gürültüyü yok eder ve temiz bir akustik sinyal sağlar. İşitme cihazı kullanıcısının konuşmaların tamamını dikkat dağıtan sesler olmadan duymasını sağlar.

Feedback Silici Isık Kesici ile birlikte çalışarak, işitme cihazı kullanıcısı telefondaiken ya da sevdiği birine sarılırken istenmeyen gürültüleri ve isık sesini önler.

İki Cihaz Arası Senkronizasyon: Bir cihazdaki program ve ses şiddeti değişikliklerini otomatik olarak diğer cihazda da uygular. Kullanıcının diğer cihazını da ayarlamasına gerek kalmaz. Akıllı Kazanç Pro ve Ses Temizleyici Pro ile birlikte, cihazın doğru ayarlarda çalışmasını sağlar.

Ses Deęiştirici: Duyulması zor olan yüksek frekanslı sesleri, ses spektrumunun daha küçük bir alanına sıkıştırarak daha kolay duyulmalarını sağlar. Bu da işitme cihazı kullanıcılarınıza hayatlarındaki önemli ayrıntıları kaçırmak yerine ses spektrumunun tamamını algılama zevkini yaşatır.

Senkronize Kazanç: İlk kez işitme cihazı kullanacak kişilerin başlarda yüksek sestten rahatsız olmaması için, kazanç ayarlamalarına daha kolay alışmalarını sağlar. Kazançtaki deęişiklik yavaş yavaş gerçekleşir, işitme cihazı kullanıcınızın yaşam tarzına göre bu süreçte deęişiklik de yapabilirsiniz. Senkronizasyon özellięi sayesinde iki cihaz bu ayarlama esnasında senkronize kalır. Yani kazanç kişinin ihtiyacına göre adapte edilirken, cihazlar aynı noktada eşitlenir.

**Kodu tarayıp
bu özellikleri anlatan
videolarımızı izleyin**





İşitme cihazı kullanıcılarının %90'dan fazlasına uyan ilk RIE işitme cihazımız





Beltone First piyasadaki en çok yönlü işitme cihazıdır. Ultra power hoparlörü hafif-çok ileri derece kayıplar için geniş bir fitting aralığı yaratır. Yani bu cihazı 10 işitme cihazı kullanıcısının 9'undan fazlasına uygulayabilirsiniz. Bu yüzden Beltone First'ü tavsiye etmek çok kolaydır.

Hızlı, kolay, güvenilir fitting

Beltone First'ün kolay ve hızlı fittingi kullanıcılar için de sıkıntısız ve hoşnut kalacakları bir deneyim olacaktır. Solus 1.6 fitting yazılımı, 2.4 GHz teknoloji ve Airlink ile işitme cihazı kullanıcılarınızın işitme cihazlarına kablosuz bağlanır. Bu şekilde adaptör, ek bir cihaz ya da kablo kalabalığı olmadan doğru bir ayar yapabilirsiniz. Ayrıca Solus Pro'da artık farklı güçteki hoparlörleri konfigüre etmeye gerek kalmadığı için ayar yapmak daha basit ve kısa bir işlem haline geliyor.

Minimum görünürlük, maksimum rahatlık

Beltone First şimdiye kadar tasarlanan en küçük ve göze çarpmayan işitme cihazlarından biridir. Harika ses kalitesinin ve estetiğin bir araya getirildiği bu cihaz o kadar küçüktür ki neredeyse hiç fark edilmez. Dolayısıyla işitme cihazı kullanıcılarınız işitme cihazı kullanıyor olmanın yaşatabileceği fiziki ya da sosyal sıkıntıları yaşamaz. Beltone First farklı tarzlara uygun sekiz renk seçeneğine de sahiptir.

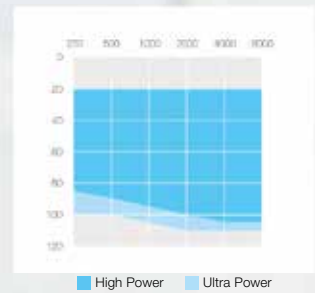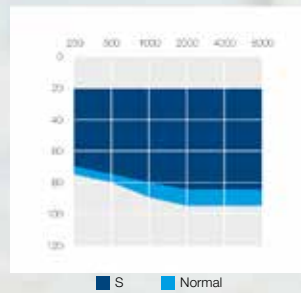

Daha da geniş fitting aralığı Beltone First'ü işitme cihazı kullanıcılarının %90'dan fazlası için uygun kılar. Custom kalıplı ultra power hoparlör ise ileri-çok ileri derecede

kayıbı olan işitme cihazı kullanıcıları için idealdir. Artık hemen hemen herkes Beltone First'ün küçük boyutundan ve görünmezliğinden faydalanabilecek.